

FICHA TÉCNICA

Rely+On™ Perasafe™

Revisión C

Fecha de revisión: 10.11.11



Fabricante: Antec International Limited
Windham Road
Chilton Industrial Estate
Sudbury / Suffolk - CO10 2XD
United Kingdom

Distribuidor: TEDEC-MEIJİ FARMA
Ctra. M300, Km. 30,500
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf. 91 887 09 80 Fax: 91 883 70 23

Nombre del producto: Rely+On™ Perasafe™

Presentaciones: Caja de 12 envases de 162 gramos polvo c/u
Caja de 6 envases de 810 gramos polvo c/u

Características: Sistema en polvo, único para conseguir una desinfección de alto nivel rápida y segura de equipos e instrumental médico, incluyendo endoscopios sensibles a la esterilización por calor. Se activa al disolverlo en agua, formando iones peracetato a pH8. Eficacia probada frente a esporas, virus, bacterias (incluyendo micobacterias) y hongos. No contiene aldehídos, no precisa monitorización ni ventilación. No daña el instrumental.

Composición: El principal agente activo es una forma sólida y estabilizada de peróxido de hidrógeno. Contiene un sistema activo binario que genera iones peracetato biocidas al ser disueltos en agua. El resto de la formulación consiste en estabilizantes, inhibidores de corrosión, amortiguadores, agente tensoactivo y colorante.

Especificaciones: Aspecto (puro): polvo fino de tonalidad blanquecina y azulada
Aspecto (solución desinfectante): líquido de color azul claro.
Solución prácticamente inodora. pH (solución 1%) = 8

Aplicaciones: La solución activada Rely+On™ Perasafe™ está indicada para la desinfección de alto nivel rápida y segura de todos los instrumentos, incluyendo endoscopios sensibles a la esterilización por calor.

Forma de uso: La activación del sistema Rely+On™ Perasafe™ es necesaria para producir la solución desinfectante. Preparar el volumen de agua requerido a 35°C (agua templada).
Añadir 16,2 gr. de polvo por cada litro de agua (bote de 162 gr. en 10 litros de agua o una unidad de medida enrasada hasta la línea, en un litro de agua).
Agitar hasta obtener una solución azul claro.
Solución lista para su uso. La solución Rely+On™ Perasafe™ puede ser utilizada durante al menos 24 horas después de su preparación.

Desinfección de instrumental

Preparar la solución de Rely+On™ Perasafe™ según se indica anteriormente.
Limpiar previamente los instrumentos de la manera habitual.
Sumergir el instrumental en la solución Rely+On™ Perasafe™ durante 10 minutos para conseguir su desinfección.
Sacar el instrumental y aclarar con agua esterilizada antes de usar.

Recomendaciones: El producto requiere el uso de guantes solo cuando se maneja el polvo. No es necesaria la extracción de los gases producidos en la preparación de la solución. El polvo Rely+On™ Perasafe™ es irritante para piel y ojos. Evitar la inhalación del mismo. La solución Rely+On™ Perasafe™ ha demostrado no ser irritante para la piel. La solución activada tiene un olor suave a ácido acético. El producto está registrado de acuerdo con los requisitos de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/ECC como un Producto Sanitario. Posee marca CE, número de organismo notificador CE0086.