

VIRKON – FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	VIRKON
Código interno proveedor	451220 : Caja 50 sobres x 50 g. polvo c/u 451200 : Bidón 5 kg. Polvo
Características	Desinfectante de amplio espectro (bactericida, micobactericida, fungicida, esporicida, viricida) a base de un sistema de múltiples componentes que actúa sobre los microorganismos inactivando sus ácidos nucleicos. Biodegradable. Con indicador visual de actividad. Corto tiempo de actuación (5 a 10 minutos). Contiene un agente detergente que permite hacer limpieza y desinfección en un solo paso. No fija materia orgánica ni se inactiva en su presencia. Apto para superficies hospitalarias.
Composición	Triple sal inorgánica (monopersulfato potásico, sulfato hidrógeno potásico y sulfato potásico), ácidos sulfámico y málico, hexametáfosfato de sodio, dodecil-bencen-sulfonato sódico, cloruro sódico, color amaranto CEE 123 y perfume de cáscara de limón.
Especificaciones	Aspecto (puro): polvo granular de color rosa grisáceo. Suave aroma a limón. Aspecto (solución desinfectante): líquido de color rosa. Solución prácticamente inodora. pH (solución 1%) = 2.6
Aplicaciones	Desinfectante de amplio espectro germicida y agente limpiador (superficies hospitalarias: suelos, mobiliario y desinfección aérea).
Forma de uso	Preparar solución desinfectante (1% - 10gr/1 litro) vertiendo la cantidad necesaria de polvo Virkon en agua corriente. La solución permanece activa mientras permanece el color rosa de la misma (unos 7 días de duración). Cuando palidece, desecharla y preparar más. Superficies y mobiliario: aplicar solución desinfectante (1%) por pulverización fina sobre todo tipo de superficies, o mediante paño humedecido en la solución (1%). Suelos: aplicar solución desinfectante (1%) mediante sistema doble cubo o sistema de arrastre. Vertidos de fluidos corporales/sangre: Cubrir el vertido con el granulado Virkon. Dejar durante 3 minutos. Retirar con paño o toalla de papel la mezcla de polvo/fluido y depositarlo en un contenedor para ser eliminada de forma segura. Lavar y desinfectar el área con la solución Virkon (1%). Ambiente / desinfección aérea: nebulizar solución desinfectante (plazo seguridad 3 h) en el aire mediante equipo de ultra bajo volumen (UBV) en frío. En todos los casos, dejar actuar 10 minutos. Eliminar cualquier depósito blanco que se haya producido durante el secado con una toalla de papel.
Instrucciones para su manejo	La única contraindicación de Virkon es el que exista hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes, en estado granular. Todos los desinfectantes en forma granulares deberán manipularse con guantes de goma y se evitará la inhalación del producto. La solución Virkon está clasificada como no tóxica y no irritante para la piel y ojos, no posee una fase de vapor y su toxicidad oral es inexistente. El polvo está clasificado como irritante.
Frases R/S	R36/33/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos S22: No respirar el polvo. S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. SS45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

Revisión Nº: 1

Fecha: 23/11/06

Fabricante: Antec International Limited – Chilton Industrial Estate – Sudbury – Suffolk

Distribuidor exclusivo para España en el Sector Salud Humana (sector hospitalario, clínicas privadas): Tedec-Meiji Farma, S.A. – Ctra. M.-300, km 30,500 – 28802 Alcalá de Henares, Madrid. Telf.: 91 887 09 80. Fax: 91 883 70 23.